

## Sedute chirurgiche BALANCE SUPREME

BALANCE SUPREME offre il massimo comfort di seduta e una posizione di lavoro ergonomica per l'intera durata del trattamento.

È caratterizzata da un'ampia gamma di opzioni di impostazione dei braccioli.



	BALANCE SUPREME F	BALANCE SUPREME F&B
Articolo	S3.10.13.5110	S3.11.13.5110
Diametro sedia ø mm	610	610
Altezza seduta mm	560-660	560-660
Regolazione altezza	Comando a pedale	Comando a pedale
Freno		•
Sedile BALANCE mm	460x420	460x420

### Funzionamento



#### Regolazione altezza a pedale

1. Spingere il disco con il piede.
2. Sollevare il sedile per regolarlo verso l'alto.
3. Appoggia un peso sul sedile per regolarlo verso il basso.
4. Per bloccare, togliere il piede dal disco.



#### Inclinazione dello schienale

1. Tira la leva ❶ sul lato sinistro della sedia.
2. Regolare l'inclinazione desiderata inclinando il corpo in avanti o all'indietro.
3. Per bloccare, rilasciare nuovamente la leva.



#### Sedile inclinabile

1. Tira la leva ❷ sul lato destro della sedia.
2. Regolare l'inclinazione del sedile inclinandosi in avanti o all'indietro.
3. Per bloccare, rilasciare nuovamente la leva.



#### Regolazione altezza schienale

1. Aprire la leva ❸ fino a rilasciare il blocco.
2. Impostare l'altezza desiderata e richiudere la leva.



#### Regolazione altezza del bracciolo

Premere il pulsante laterale per regolare l'altezza.



#### Regolazione lunghezza bracciolo

Far scorrere il bracciolo autobloccante.



#### Inclinazione del bracciolo

Oscillare il bracciolo ❹ avanti o indietro.



#### Rotazione del bracciolo

Ruotare l'imbottitura del bracciolo autobloccante.